

Serie TAT 5000S

Professionelle Modelle


EXERGEN
Temporal**Scanner**™




Schlüssellose Wandhalterung mit Verriegelungsfunktion

Installations- und Gebrauchsanweisungen


- Die Halterung ist so konzipiert, dass sie sowohl mit als auch ohne Verriegelungsfunktion verwendet werden kann. Um die Verriegelungsfunktion zu aktivieren, installieren Sie den mitgelieferten Verriegelungsmechanismus mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wie abgebildet. Um die Schraube durch die Unterlegscheibe und die Verriegelung leichter einführen zu können, drehen Sie die Halterung auf den Kopf. Setzen Sie die Verriegelung auf den zylindrischen Abstandshalter, legen Sie dann eine Unterlegscheibe darauf und schrauben Sie die Schraube durch die Unterlegscheibe und den Riegel in das Kunststoffloch. Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen. Übermäßiger Kraftaufwand kann zu Rissen oder einem Abplatzen des Kunststoffs führen.

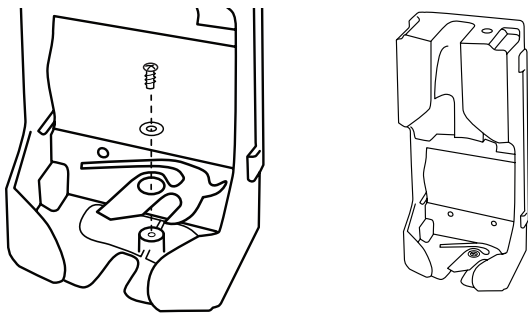


- Verwenden Sie den Einsatz, um alle TAT-5000S Modelle ordnungsgemäß zu sichern.

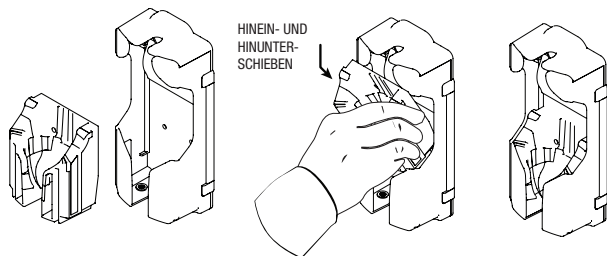


- Richten Sie die Wandhalterung an der Wand aus und markieren Sie die Bohrlöcher. Setzen Sie den Einsatz in die Wandhalterung ein und befestigen Sie ihn sicher an der Wand.
- Setzen Sie das Gerät wie abgebildet in die Halterung ein, indem Sie es durch die Öffnung führen und mit dem Daumen in die Verriegelungsnut drücken. Der Verriegelungsmechanismus sollte beim Einrasten ein Klicken von sich geben.

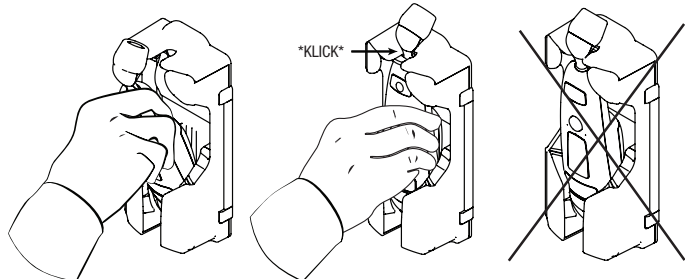

- Um das Gerät zu entfernen, ziehen Sie einfach wie abgebildet die obere linke Lasche nach außen; das Gerät wird durch die Öffnung herausgeführt.

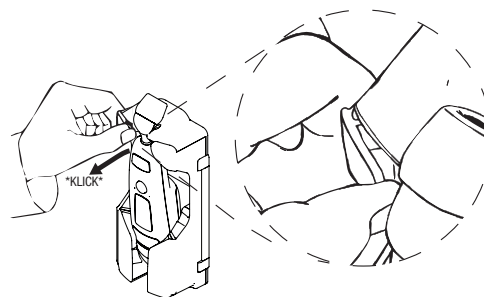


- Bei Geräten mit Stahlsicherheitskabel das Gewindeende wie abgebildet sicher in der Halterung befestigen.

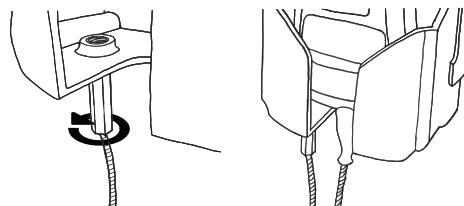

- Bei Geräten mit Spiralkabel das Gewindeende wie abgebildet fest in der Halterung befestigen.



- Bei schlüssellosen Wandhaltern mit integriertem Verschlusskappenhalter entfernen Sie zum Austauschen der Verschlusskappen die Abdeckung des Spenders wie abgebildet und setzen Sie die Verschlusskappen ein. Entfernen Sie eine Verschlusskappe nach Bedarf, indem Sie die untere Kappe wie abgebildet nach unten ziehen.

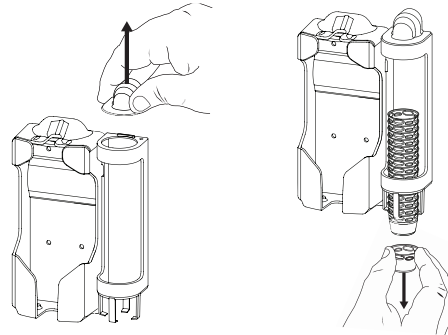

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Entwickelt, konstruiert,
montiert, getestet und
verpackt in den USA
von Exergen



Für zusätzliche
Dokumentationen und neueste
klinische Studien hier scannen
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
Dok.-Nr. 818672-DER3