

Serie TAT-5000S

Modelos profesionales


EXERGEN
TemporalScanner™




Soporte de montaje pared con bloqueo sin llave

Instrucciones de instalación y uso

1. El soporte se puede utilizar con o sin bloqueo. Para activar la función de bloqueo, instale el mecanismo de bloqueo suministrado utilizando un destornillador de estrella, como se muestra en la ilustración. Para facilitar la instalación del tornillo a través de la arandela y el pestillo, dé la vuelta al soporte. Asiente el pestillo sobre el separador cilíndrico, coloque la arandela en la parte superior e instale el tornillo a través de la arandela y el pestillo en el orificio de plástico. No apriete demasiado. Una fuerza excesiva podría agrietar o rayar el plástico.

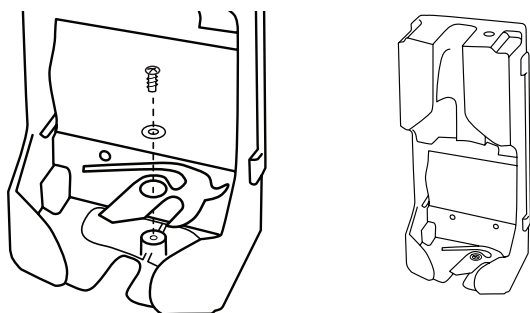


2. Utilice el inserto para fijar correctamente todos los modelos TAT-5000S.

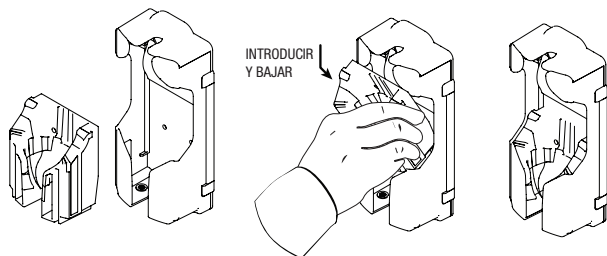


3. Alinee el dispositivo de montaje en pared y marque la ubicación de los orificios. Añada el inserto al dispositivo de bloqueo del soporte y fíjelo firmemente a la pared.


4. Instale el instrumento en el soporte tal y como se muestra, empujando el instrumento a través de la abertura para guiarlo por la ranura de bloqueo con el pulgar. El mecanismo de bloqueo debe hacer un clic al encajarse.

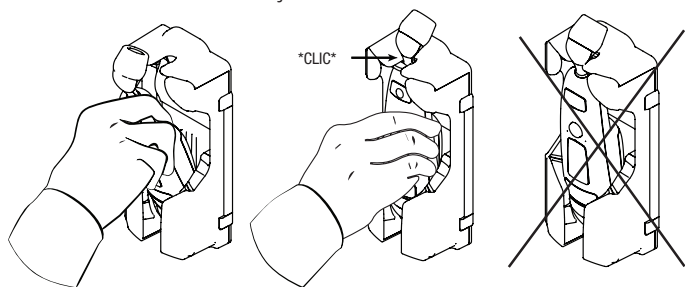


5. Para extraer el instrumento, solo tiene que tirar hacia fuera de la solapa superior izquierda como se muestra y el instrumento saldrá por la abertura.

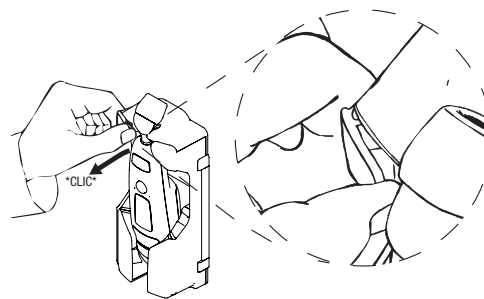


6. En el caso de instrumentos con cable de seguridad de acero, fije firmemente el extremo roscado en el soporte como se muestra.

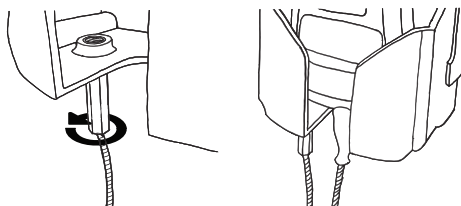

7. En el caso de instrumentos con cable en espiral, fije firmemente el extremo roscado en el soporte como se muestra.

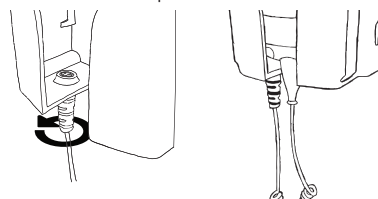

8. En los soportes de montaje en pared con cierre sin llave con portatapas, para sustituir las tapas, retire la tapa del dispensador tal como se muestra e introduzca las tapas. Saque la tapa cuando lo necesite tirando hacia abajo de la tapa inferior como se muestra.

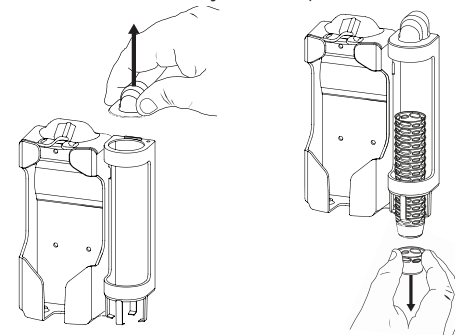

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Inventado, diseñado,
montado, probado y
envasado en EE. UU.
por Exergen.



Escanee para acceder a
documentación adicional y a los
estudios clínicos más recientes
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-ESr3