

TAT-5000S-serien

Profesjonelle modeller


EXERGEN
TemporalScanner™




Veggfeste med nøkkelfri låsing

Monterings- og bruksinstruksjoner

1. Veggfestet er utformet for å fungere med eller uten låsefunksjonen. For å aktivere låsefunksjonen må du installere den medfølgende låsemekanismen ved hjelp av en Philips-skrutrekker som vist. For å gjøre det enklere å montere skruen gjennom skiven og låsen, snu veggfestet opp ned. Plasser låsehaken over det sylindriske avstandsstykket, sett deretter skiven på toppen, og monter skruen gjennom skiven og låsehaken inn i plasthullet. Unngå å stramme for hardt. Bruk av overdreven kraft kan føre til at platen sprekker eller at gjengene blir ødelagt.

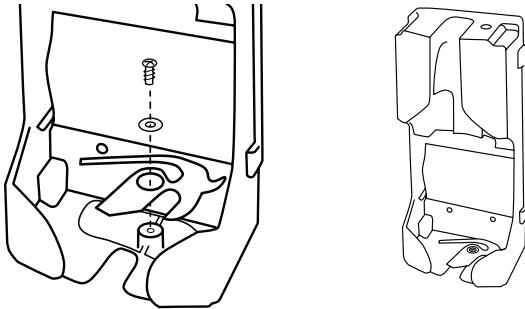


2. Bruk innsatsen til å feste alle TAT-5000S-modeller på korrekt måte.

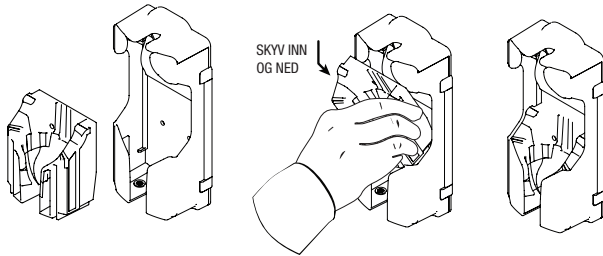


3. Rett inn veggfestet mot veggen og marker hvor hullene skal plasseres. Sett innsatsen i veggfestets låseanordning og fest den godt til veggen.


4. Monter instrumentet i festet som vist ved å føre instrumentet gjennom åpningen og trykke det inn i låsesporet med tommelen. Låsemekanismen skal gi fra seg et klikk når den smekker på plass.

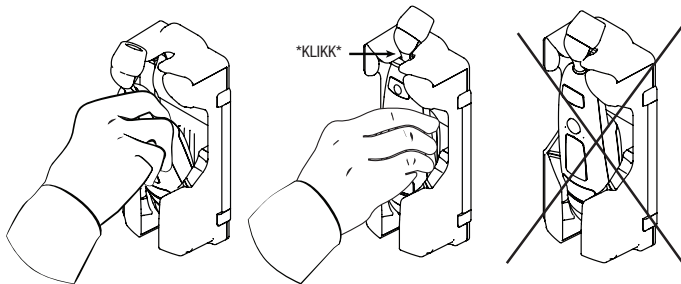


5. For å ta ut instrumentet trekker du klaffen øverst til venstre utover som vist, og instrumentet vil komme ut gjennom åpningen.

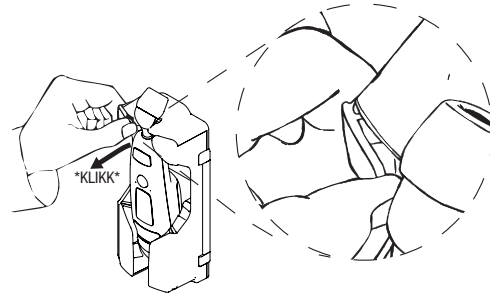


6. For instrumenter med sikkerhetskabel i stål, fest den gjengede enden godt i veggfestet som vist.

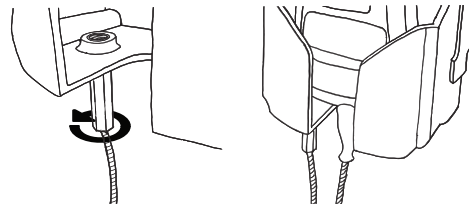

7. For instrumenter med spiralkabel, fest den gjengede enden godt i veggfestet som vist.

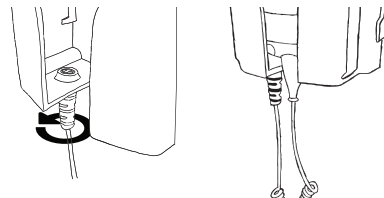

8. For nøkkelfrie, låsbare veggfester med medfølgende hetteholder: For å skifte ut hetter, fjern dekelet på dispenseren som vist og sett inn hetter. Fjern hetter etter behov ved å trekke den nederste hetten nedover som vist.

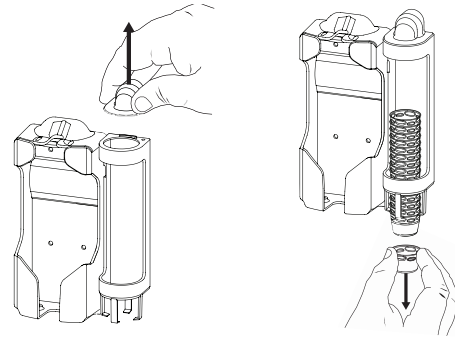

EXERGEN Corporation
400 Pleasant Street
Watertown, MA 02472



Oppfunnet, designet,
montert, testet og
pakket i USA av
Exergen



Skann for å få tilgang til
ytterligere dokumentasjon og
de nyeste kliniske studiene
www.exergen.com/s

©2026 Exergen Corp.
doc p/n 818672-NOR3